

CAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック

# ARTESANO

## アルテサーノ

ナノフィラー配合により優れた研磨性を有し、艶出しが容易!!

従来のSサイズに加え **Mサイズ**を新発売!!


色調には、**A1・A4**を追加!!

ラインナップがさらに充実!!



【物性】


3点曲げ強さ [MPa]	195
2軸曲げ強さ [MPa]	230
圧縮強さ [MPa]	526
ビッカース硬度 [Hv]	71
蛍光性	あり

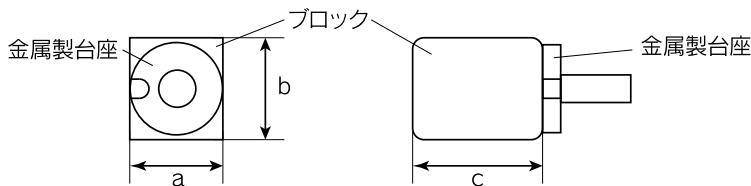


種類	サイズa×b×c(mm)	色調	容量	標準価格(税抜)
Sサイズ	10×12×15	A1・A2・A3・A3.5・A4	5個入 / 箱	¥15,000
Mサイズ	12×14×18			¥17,000

## 支台歯形成のポイント(小白歯)

### ■形成の注意点

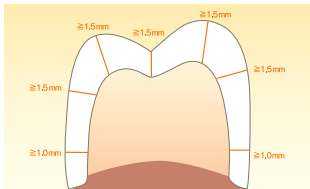


咬合面は1.5mm以上、マージン部は1.0mm以上の厚みを確保してください。

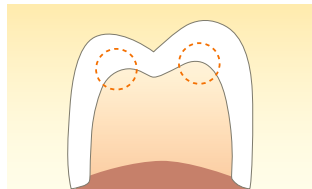

隅角は丸みを付けなめらかにしてください。


### ■マージン形成

(ディープシャンファア)

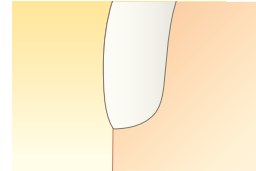

マージン形成はディープシャンファアやラウンドショルダーとしてください。

(ラウンドショルダー)

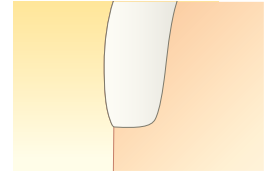


## 装着のポイント




①プラスト処理  
0.1~0.2MPaの圧力で約30~70μmのアルミナ粒子を用いサンドプラスト処理します。



②リン酸処理  
試適後は、クラウン内面をリン酸等で洗浄し、水洗・乾燥します。

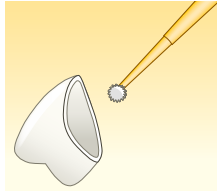


③表面処理  
クラウン内面をシランカップリング処理します。

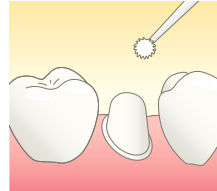

④支台歯処理  
支台歯処理は、使用するセメントの説明書に従って行ってください。



⑤セメント塗布  
クラウン内側にCAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック対応のレジンセメントを塗布します。

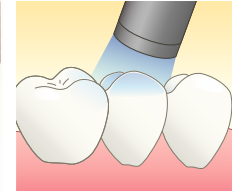

⑥光重合  
通法に従って重合してください。

# アルテサーノ – 研磨ステップ –

## ①コネクタークット及び形態修正

### 山八技工用カーバイドバー(クロスカット)

歯科技工用カーバイド切削器具

23B1X10001C09069

一般医療機器

### ■ファインシリーズ



最大回転数	20,000rpm	
包装単位	10本入セット(各形態 各1本)	標準価格 ¥18,000
	単品(1本/ケース)	標準価格 ¥2,000

## ②中仕上げ研磨

### ニューシリコンポイントII

歯科用ゴム製研磨材 金属・レジン中研磨用ポイント

23B1X10001C09049

一般医療機器



形状	#10 #13 #13S #28 #114
種類	#162 #カップ #シリンドア 中仕上用ブラウン・仕上用グリーン (#シリンドアはブラウンのみ)
回転数	30,000rpm以下 (#162・#シリンドアは15,000rpm以下)
包装単位	12本入/箱 標準価格 ¥1,500
	72本入/箱 標準価格 ¥8,000
	#シリンドア 72本入/箱 標準価格 ¥3,600 (専用マンドレル1本付)

※13Sブラウン推奨  
※シリンドアは72本入/箱のみとなります。

## ③艶出し研磨

### ジルコスター

歯科用研磨器材

13B1X100089000958

一般医療機器



製造販売元 (株) マイクロテック

【特徴】  
ダイヤモンド粒子配合で、ジルコニア・ポーセレン・ハイブリッド硬質レジンの艶出しが素早くできます。

包装単位 20g 標準価格 ¥9,000

### バンピネスブラシ

歯科用研磨器材

23B1X10001C09018

一般医療機器



【特徴】  
歯間から咬合面までくまなく密着するため、効率的な研磨ができます。

種類 ソフト(#9・#11)  
レギュラー(#9・#11)

包装単位 12本入/箱 標準価格 ¥1,500

※レギュラー推奨

### ホイールパフ#2

歯科用研磨器材

23B1X10001C09061

一般医療機器



材質 セーム皮

サイズ 作業部直径φ22mm

包装単位 12本入/袋 標準価格 ¥2,200

## ④さらに艶を出したい場合

### ブルーシャイン

歯科用研磨器材

23B1X10001C09009

一般医療機器



包装単位 50g 300g

標準価格 ¥700 ¥3,800

### ホイールパフ#1

歯科用研磨器材

23B1X10001C09061

一般医療機器



材質 フェルト

サイズ 作業部直径φ22mm

包装単位 12本入/袋 標準価格 ¥800

※艶出し研磨工程には低速での研磨を推奨致します。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~ (お問い合わせ・ご購入等もお待ちしております)

www.yamahachi-dental.co.jp/

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1  
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764  
Home Page http://www.yamahachi-dental.co.jp/  
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp